

YOU CAN'T SPELL ABUTMENT WITHOUT NT

Vorsprung durch Innovation

NT *digital
implant
technology*

NT - IQ CAD Bibliothek für **exocad**[®]

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

1. Besuchen Sie unsere Homepage und gehen Sie in den Download Bereich.
2. Dort können sie den entsprechenden Reiter für exocad anwählen.
3. Geben Sie Ihre Email Adresse im dafür vorgesehenen Feld ein.
4. Klicken Sie auf Absenden

The screenshot shows the website's navigation menu with 'DOWNLOADS' highlighted. Below the menu, there are three columns of links. The first column, 'AUFTRAGSFORMULARE NT-IDENT', lists forms for new customers, orders, and CAD files. The second column, 'INSTALLATIONSANLEITUNGEN NT-IQ CAD BIBLIOTHEK', provides instructions for downloading and installing the CAD programs. The third column, 'KATALOGE', lists various catalogs and brochures. The fourth column, 'ZERTIFIKATE', lists ISO 13485:2016, MDSAP, and MDD certifications. The fifth column, 'IFU (INSTRUCTION FOR USE)', lists medical and non-medical products. The sixth column, 'SONSTIGES', lists additional documents like the SEPA form and general terms and conditions. At the bottom, there is a search bar with 'exocad' entered and a red box around it, and an 'ABSENDEN' button with a red arrow pointing to it.

NT digital implant technology

UNTERNEHMEN PRODUKTE NT-TV **DOWNLOADS** NEWS KONTAKT

DE ▼

AUFTRAGSFORMULARE NT-IDENT

- [Neukundenformular \(ausfüllbar\)](#)
- [Auftragsformular Implantatgetragen \(ausfüllbar\)](#)
- [Auftragsformular Kronen/Brücken \(ausfüllbar\)](#)
- [Auftragsformular VAL-jig \(ausfüllbar\)](#)

INSTALLATIONSANLEITUNGEN NT-IQ CAD BIBLIOTHEK

nt-iq Bibliotheken inkl. Installationsanleitungen für die unten aufgeführten CAD Programme. Bitte geben Sie für den Download Ihre E-Mail Adresse an. Bei Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

3shape **exocad** dental wings

Design

←

←

KATALOGE

- [Katalog 2019 \(PDF, 13MB\)](#)
- [Online-Blätterkatalog 2019](#)
- [Produktinformation MEG-Serie und Y-Serie](#)
- [Broschüre nt-iDent Technologiezentrum](#)

PRODUKTINFORMATIONEN UND ARBEITSANLEITUNGEN

- [Surgical Guide Sleeve](#)
- [nt-DIM Anleitung für konv. Modelle](#)
- [nt-PREFORM Anleitung](#)
- [nt-trading Datenblätter](#)
- [DIM \(Digitale Implantat Modelle\) DIM Anwendungen im 3shape® Modelbuilder](#)
- [2CONnect® Komponenten und Anwendung](#)
- [VAL-jig Anleitung](#)

ZERTIFIKATE

- [ISO 13485:2016 Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Abutments \(Aufbauten für Dentalimplantate\) und Abutmentschrauben sowie Dentalkunststoffe sowie Herstellung von Sonderanfertigungen von dentalen Gerüsten](#)
- [MDSAP: Medical Device Single Audit Program](#)
- [MDD: EU Directive 93/42/EEC Abutments für Dentalimplantate und Abutmentschrauben sowie Dentalkunststoffe](#)
- [Garantie-Bedingungen für Abutment Produkte](#)

IFU (INSTRUCTION FOR USE)

- [Medizinische Produkte](#)
- [Nicht-Medizinische Produkte](#)

SONSTIGES

- [Formular SEPA-Lastschrift](#)
- [Allgemeine Verkaufsbedingungen](#)

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

4. Drücken Sie auf Download
5. Speichern Sie die Datei an einem von Ihnen bevorzugten Ort auf Ihrem PC
6. Dekomprimieren Sie die Datei NT-IQ_Version.zip.
Darin finden Sie die benötigten Ordner der NT Bibliothekskomponenten

NT digital implant technology

UNTERNEHMEN PRODUKTE NT-TV **DOWNLOADS** NEWS KONTAKT DE

AUFTRAGSFORMULARE NT-IDENT
Neukundenformular (ausfüllbar)
Auftragsformular Implantatgetragen (ausfüllbar)
Auftragsformular Kronen/Brücken (ausfüllbar)
Auftragsformular VAL-IG (ausfüllbar)

INSTALLATIONSANLEITUNGEN NT-IQ CAD BIBLIOTHEK
nt IQ Bibliotheken inkl. Installationsanleitungen für die unten aufgeführten CAD Programme. Bitte geben Sie für den Download Ihre E-Mail Adresse an. Bei Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

KATALOGE
Katalog 2019 (PDF, 13MB)
Online-Blätterkatalog 2019
Produktinformation M/G-Serie und Y-Serie
Brochure nt iDent Technologiezentrum

PRODUKTINFORMATIONEN UND ARBEITSANLEITUNGEN
Surgical Guide Sleeve
nt DIM Anleitung für konv. Modelle
nt PREFORM Anleitung
nt tradice Datenblätter
DIM (Digitale Implantat Modelle) DIM Anwendungen im Inlay® ModelBuilder
ZCONnect® Komponenten und Anwendung
VAL-IG Anleitung

ZERTIFIKATE
ISO 13485:2014 Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Abutments (Aufbauten für Dentalimplantate) und Abutmentschrauben sowie Dentalkunststoffe sowie Herstellung von Sonderanfertigungen von dentalen Geräten
MDSAP: Medical Device Single Audit Program
MDA: EU Directive 93/42/EEC Abutments für Dentalimplantate und Abutmentschrauben sowie Dentalkunststoffe
Garantie-Bedingungen für Abutment Produkte

IFU (INSTRUCTION FOR USE)
Medizinische Produkte
Nicht-Medizinische Produkte


SONSTIGES
Formular SEPA Lastschrift
Allgemeine Verkaufsbedingungen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
NT-IQ_2019.2.2_ZCON	16.08.2019 17:14	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_DIM	16.08.2019 17:15	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_Preform	16.08.2019 17:17	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB	16.08.2019 17:18	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB_NX	16.08.2019 17:16	Dateiordner	

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

7. Öffnen Sie im Explorer das Verzeichnis „Exocad-DentalCAD / DentalCAD App / library / implant“. Der Pfad befindet sich im Laufwerk, auf dem die exoCAD Software installiert ist.


Vor dem Import der neuen Bibliothek wird empfohlen vorhandene NT-trading Bibliotheken in den entsprechenden Ordnerstrukturen der exoCAD DentalCAD App zu löschen, um Überschneidungen bzw. Verwechslungen zu vermeiden.

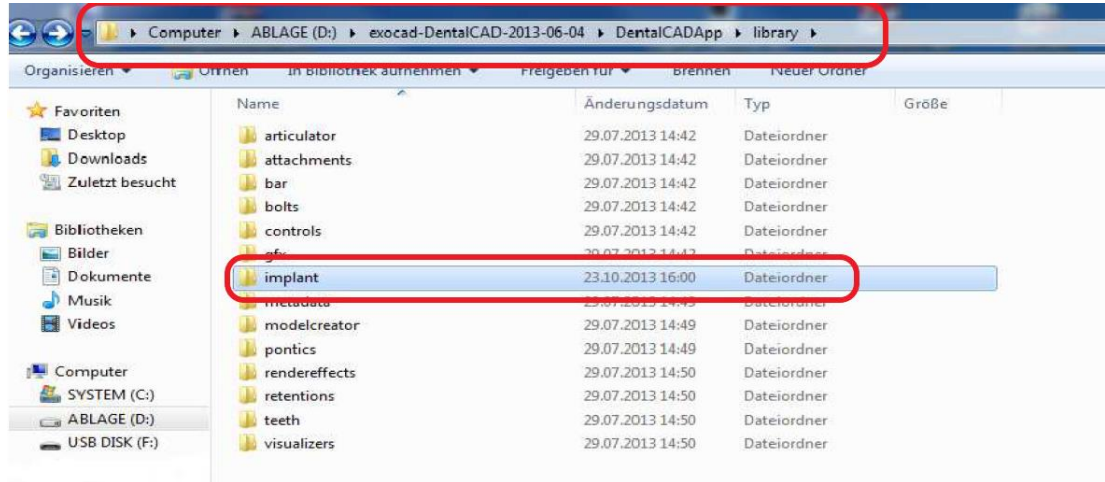

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

7. Öffnen Sie nun parallel den Datei Ordner mit den NT – Bibliothekskomponenten und **kopieren Sie nacheinander die Inhalte** der Ordner „Preform“, „TiB“, „TiB_NX“ und „2 CON“ und fügen Sie deren **Inhalte in den Ordner „Implant“ ein.**

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
NT-IQ_2019.2.2_2CON	16.08.2019 17:14	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_DIM	16.08.2019 17:15	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_Preform	16.08.2019 17:17	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB	16.08.2019 17:18	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB_NX	16.08.2019 17:16	Dateiordner	

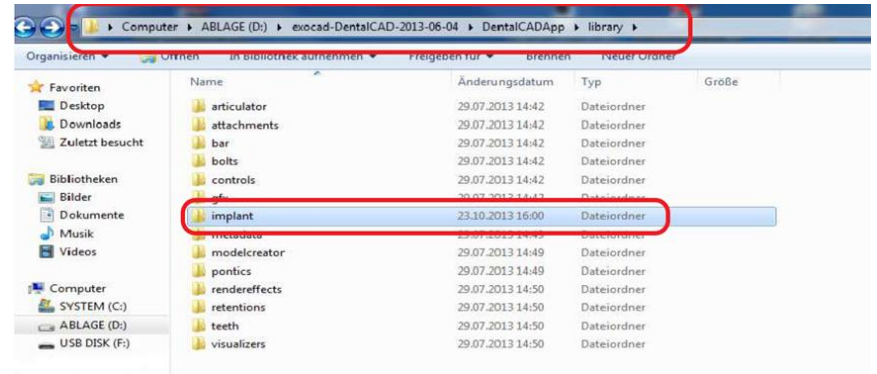

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

8. Um unsere Bibliothek für DIM Analoge (Modellanaloge für 3D gedruckte Modelle) zu Importieren, öffnen Sie das Verzeichnis „Exocad-DentalCAD / DentalCAD App / library / implant / modelcreator / implants“ und fügen Sie den Inhalt des „DIM“ Ordners aus dem Download, wie im Vorherigen Schritt beschrieben, ein.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
NT-IQ_2019.2.2_CON	16.08.2019 17:14	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_DIM	16.08.2019 17:15	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_Preform	16.08.2019 17:17	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB	16.08.2019 17:18	Dateiordner	
NT-IQ_2019.2.2_TiB_NX	16.08.2019 17:16	Dateiordner	

» I-DENT » exocad » exocad-DentalCAD-64Bit-2018-03-21 » DentalCADApp » library


Name	Änderungsdatum	Typ
articulator	28.01.2020 12:48	Dateiordner
atriegidger	28.01.2020 12:48	Dateiordner
attachments	28.01.2020 12:48	Dateiordner
bar	28.01.2020 13:07	Dateiordner
bolts	28.01.2020 12:48	Dateiordner
bridgesplitter	28.01.2020 12:48	Dateiordner
ceramics	28.01.2020 12:48	Dateiordner
gfx	28.01.2020 12:48	Dateiordner
implant	28.01.2020 12:55	Dateiordner
stutdata	28.01.2020 12:46	Dateiordner
modelcreator	28.01.2020 12:47	Dateiordner
movemenregister	28.01.2020 12:47	Dateiordner
nesting	28.01.2020 12:47	Dateiordner
portics	28.01.2020 12:47	Dateiordner
protheticteethsets	28.01.2020 13:06	Dateiordner
rendereffects	28.01.2020 13:06	Dateiordner
retentions	28.01.2020 12:47	Dateiordner
smiledesign	28.01.2020 13:06	Dateiordner
teeth	28.01.2020 12:47	Dateiordner
visualizers	28.01.2020 12:47	Dateiordner

exocad » exocad-DentalCAD-64Bit-2018-03-21 » DentalCADApp » library » modelcreator

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
attachments	28.01.2020 12:46	Dateiordner	
implants	28.01.2020 12:47	Dateiordner	
plates	28.01.2020 12:47	Dateiordner	

Anleitung zum Download und Installation der NT-IQ CAD Bibliothek zum Gebrauch in der exocad DentalCAD

9. Nach dem Einfügen aller NT Komponenten können Sie die Ordner schließen. Nun steht Ihnen unsere komplette NT-CAD Bibliothek nach dem Neustart der exoCAD Software zur Verfügung.

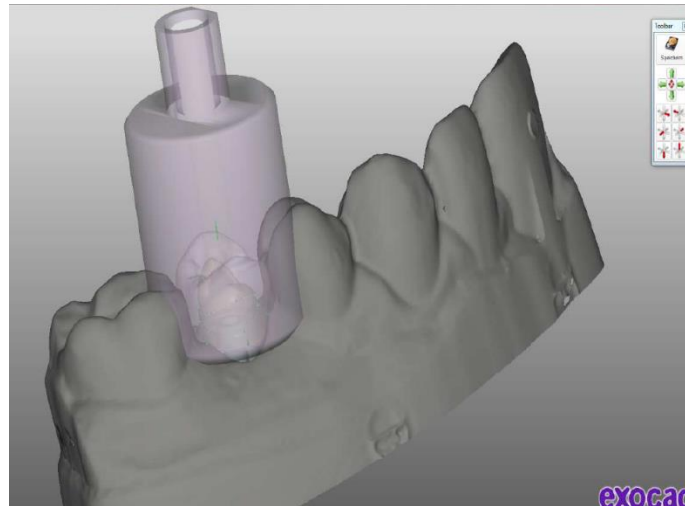



Vielen Dank!

Ansprechpartner:

NT Dental Support

Adresse:

G.-Braun-Straße 18

76187 Karlsruhe

Telefon: +49(0) 721-915471-70

Telefax: +49(0) 721-915471-6

E-Mail: i-dent@nt.dental